

HYACYST
Ácido Hialurónico Solución Estéril Inyectable
Instrucciones de Uso

Descripción

HYACYST es un producto médico que consiste en una solución de ácido hialurónico altamente purificado de origen no animal. Se utiliza como un fluido de enjuague estéril con cambios uroteliales en el uréter, la vejiga urinaria y en la parte inicial de la uretra.

HYACYST no tiene efectos farmacológicos en el tejido luego de su aplicación. Su efecto se basa en las propiedades físicas. Por ejemplo, se sabe que las inflamaciones uroteliales conducen a una pérdida de ácido hialurónico en la membrana mucosa.

La pérdida de ácido hialurónico en la membrana mucosa vascular se produce especialmente con la cistitis intersticial (CI). El urotelio se puede regenerar a través de la sustitución de ácido hialurónico.

Ocurre lo siguiente:

- Regulación de la permeabilidad de la vejiga.
- Contención de la respuesta inflamatoria.
- Apoyo a la cicatrización de las heridas.

Usar según las indicaciones

HYACYST es una solución de ácido hialurónico, la cual se inyecta en la vejiga con la ayuda de un catéter. Este fluido de solución/lavado sirve para la regeneración del urotelio que se encuentra destruido/alterado (Cistitis Intersticial (CI) en la vejiga y en las distintas vías urinarias.

Composición/Presentación

Jeringa de 50 ml que contiene 120 mg de hialuronato sódico).

Referencia para su Uso

El volumen total de la solución se coloca mediante una jeringa y un catéter de instilación en la vejiga luego de realizar un drenaje completo de la vejiga.

Se puede utilizar el contenido de la jeringa precargada directamente, quitando el tapón de ésta y conectándola a un catéter apropiado utilizando un conector Luer Lock. Para obtener óptimos resultados, el HYACYST debe permanecer en la vejiga el tiempo máximo posible (mínimo 30 minutos, máximo 2 horas). Para aliviar la Cistitis Intersticial, la literatura clínica disponible recomienda realizar el tratamiento una vez por semana por un período de cuatro semanas.

Una vez terminado este período, se debe utilizar HYACYST una vez al mes como terapia de mantención hasta que los síntomas hayan desaparecido. Si luego de cuatro semanas, no hay éxito en el tratamiento, se debe considerar la posibilidad de otro tratamiento.

Precaución

No utilice HYACYST en pacientes con hipersensibilidad al ácido hialurónico. No utilice viales o jeringas dañadas. No utilizar más de una vez. No utilizar en mujeres embarazadas o en menores de 18 años, debido a que no existen estudios aplicados a ellos. Como en cualquier aplicación urológica, es posible la aparición de una infección en el tracto urinario durante la colocación del catéter.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente (2-30°C). No congelar.

Administración

HYC-1250 S Jeringa de 50 ml contiene 50 ml de solución de HYACYST (120 mg de hialuronato sódico).

Simbología en el empaque

- Esterilizado con técnicas de procesamiento aséptico
- No reutilizar
- Prestar atención a las instrucciones de uso
- Temperatura de almacenamiento
- Fecha de vencimiento
- Denominación del lote
- Fecha de fabricación
- No utilizar si el empaque está dañado
- Mantener lejos del sol
- Mantener seco